



Verkorte handleiding CoaguChek Pro II

Het apparaat



Benodigheden

- CoaguChek PT Teststrip voor Pro II
- Vingerprikker
- Gaasje


Voor u begint

Controleer of de juiste codechip in de meter geplaatst is.



Stap 1: Aanmelden gebruiker

Zet de meter aan. Scan uw personeelsnummer op de gebruikerspas.

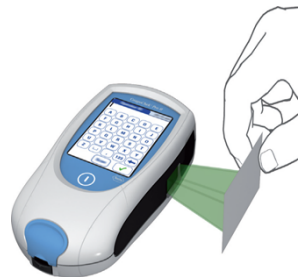


Stap 2: Aanmelden patiënt

Kies voor patiënttest en scan de barcode van de patiënt. Als dit niet kan, voer dan handmatig het patiëntnummer in.

Stap 3: Plaats teststrip

Plaats de teststrip wanneer het icoon verschijnt. Na enkele seconden begint de teller van 180 seconden af te tellen.

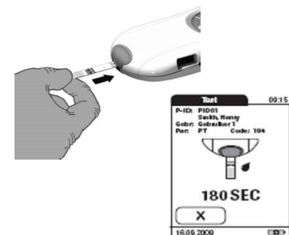



RHMDc

Stap 4: Vingerprik

Voer een vingerprik uit en gebruik de eerste druppel bloed door de druppel tegen de teststrip te houden. De strip zal zich daarna zelf vullen.



Stap 5: Resultaat

Het resultaat wordt weergegeven. Het resultaat staat in de computer zodra het apparaat in het dockingstation is geplaatst.



Aanvullende informatie

- Voer bij een patiënt met een onbekend patiëntnummer **1234567** in als patiëntnummer. Vermeld in het commentaar, via het "wolkje" de naam en geboortedatum, dan kan de order alsnog geregistreerd worden.
- Bij een INR resultaat >8 : neem een citraatbuis af en verstuur deze naar het laboratorium zodat een definitief resultaat kan worden gegenereerd.
- Bij (een vermoeden van) een foute meting kan in het resultaatscherm via het "wolkje" gekozen worden voor de volgende opmerkingen: 'Verkeerde patiënt, test wordt herhaald, Procedurefout'. De uitslag zal dan niet doorgestuurd worden naar de aanvrager.